




Rampes Pliantes Portables Avec Poignée de transport

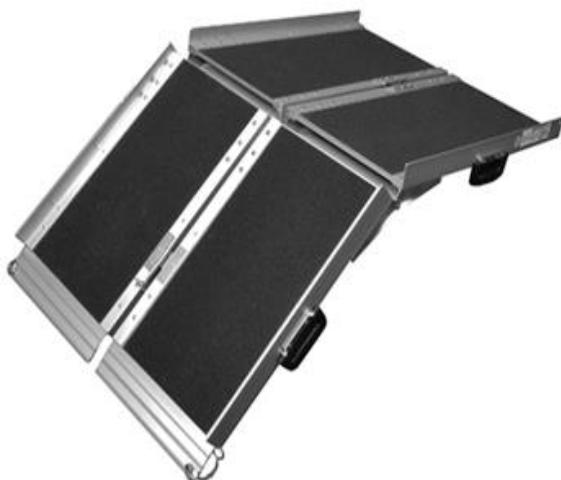

Notice d'Utilisation et d'Entretien

1. ATTENTION !

Veillez lire ce manuel avant l'utilisation. Il vous donne les informations sur l'utilisation sans danger et l'entretien de vos rampes.

Il est indispensable de toujours évaluer les risques qui peuvent surgir dans une situation donnée.

N'utilisez pas ces rampes qu'avec l'aide d'un assistant qualifié ; ne dépassez jamais la limite de poids recommandée lors de l'utilisation.

Tirez le fauteuil roulant/scooter à reculons pour descendre la pente de la rampe et utilisez une sangle sous-abdominale pour la sécurité.

Consultez toujours la rubrique concernant l'angle d'inclinaison dans le guide utilisateur pour le fauteuil concerné.

NB- Cet équipement doit être installé par une personne compétente.

VA143D 4 pieds Rampe pliante avec poignée de transport

VA143S 6 pieds Rampe pliante avec poignée de transport

Capacité de charge 272 kg (43 stone) en utilisant les deux rampes
(136 kg (21 stone) par rampe)

Ne jamais dépasser la limite de poids indiquée – cela pourrait mettre l'utilisateur en danger.

2. Usage

- Ouvrez et déployez les rampes entièrement avant utilisation afin d'éviter tout risque de blessure et rendre la montée et la descente plus facile.
- Choisissez un point d'appui où l'inclinaison de la rampe sera aussi minime que possible et que la pente ne dépasse pas la capacité du fauteuil roulant ou de l'occupant de le gravir.
- Positionnez le bord angulaire de la rampe sur le sol ou le point le plus bas, et posez l'extrémité large sur le véhicule ou le point le plus élevé.

- S'assurer que les rampes sont bien stables avant utilisation.

3. POUR OUVRIR ET JOINDRE LES SECTIONS

- Posez l'extrémité étroite de la rampe sur le sol avec la poignée en haut.
- Retirez les goupilles de verrouillage pour dégager la rampe pliée.
- Ouvrez la rampe avec précaution à l'aide de la jointure articulée jusqu'à ce qu'elles forment une rampe continue.
- Répétez cette procédure pour la deuxième rampe.
- Positionnez les deux rampes en alignant les charnières des bords longs, et insérez les goupilles de verrouillage pour les attacher ensemble.

4. POUR REPLIER

- Retirez les goupilles de verrouillage des charnières des bords.
- Repliez chaque rampe avec précaution le long de la charnière de son bord court, et insérez les goupilles de verrouillage pour les attacher en position fermée.
- Répétez cette procédure pour la deuxième rampe.

5. MAINTENANCE

Veillez vérifier régulièrement l'état de votre produit ou si vous avez le moindre doute.

6. NETTOYAGE

Nettoyez votre canne de marche avec un détergent doux non-abrasif et un chiffon doux. Les produits de nettoyage type AJAX et/ou les éponges abrasives pourraient sérieusement endommager votre produit. Vous ne devez pas les utiliser pour nettoyer votre produit. Veuillez toujours bien sécher votre appareil après le nettoyage.

7. INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations continues dans cette notice ne constituent pas un engagement contractuel par la société Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd ni par ses filiales ou agents et aucune garantie ni représentation n'est fournie concernant ces informations.

Veuillez faire preuve de bon sens et ne pas prendre de risques inutiles lors de l'utilisation du produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter votre part de responsabilité lors de l'utilisation du produit. N'hésitez pas à demander des conseils à votre revendeur ou au fabricant concernant l'assemblage et l'utilisation du produit.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX
Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web:
www.aidapt.co.uk Email: accounts@aidapt.co.uk •
adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk