



Rampes TéléscoPIques à Glissières



Notice d'Utilisation et d'Entretien

1. ATTENTION!

Il est indispensable de toujours évaluer les risques qui peuvent surgir dans une situation donnée.

N'utilisez pas les rampes qu'avec l'aide d'un assistant qualifié. Ne jamais dépasser la limite de poids recommandée lors de l'utilisation.

Tirez le fauteuil roulant/scooter à reculons pour descendre la pente de la rampe et utilisez une sangle sous-abdominale pour la sécurité. Consultez toujours la rubrique concernant le franchissement des pentes dans le guide utilisateur pour le fauteuil concerné.

-NB- Cet équipement doit être installé par une personne compétente.

VA147F 4 pieds Rampe à glissière

VA147M 6 pieds Rampe à glissière

Capacité de charge 180 kg (28 stone) en utilisant les deux rampes (90 kg/14 stone par rampe)

Ne jamais dépasser la limite de poids indiquée - cela pourrait mettre l'utilisateur en danger.

2. UTILISATION DE VOTRE RAMPE

- Déployez les rampes entièrement avant utilisation afin d'éviter tout risque de blessure et pour rendre la montée et la descente plus facile.
- Choisissez un point d'appui où l'inclinaison de la rampe sera aussi minime que possible et que ne dépasse pas la capacité du fauteuil roulant ou de l'occupant de le graver.
- Positionnez l'extrémité étroite de la rampe sur le sol ou le point le plus bas, et posez l'extrémité large sur le véhicule ou le point le plus élevé.
- S'assurer que les rampes sont bien stables avant utilisation.

POUR ÉTENDRE LA RAMPE

- Tenez la section la plus large de la rampe fermement et tirez

sur la section la plus petite jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

ATTENTION ! Pour éviter toute blessure éventuelle lors du déploiement ou rétraction de la rampe, s'assurer que les deux sections sont tenues fermement ou que l'extrémité inférieure de la rampe repose sur le sol. NE JAMAIS tenir la rampe en position levée au-dessus de vos pieds. La partie étroite de la rampe glissera rapidement vers le bas lorsque le bouton de verrouillage est enfoncé.

- Pour déployer la rampe entièrement, continuez à tirer sur la partie la plus étroite tout en appuyant sur le bouton situé à l'extérieur de la rampe, jusqu'à ce que la section se verrouille en place.
- Répétez cette procédure pour la deuxième rampe.

3. POUR RÉTRACTER LA RAMPE

- Faites glisser la section la plus étroite dans la partie principale de la rampe tout en appuyant sur le bouton de verrouillage.
- Continuer à pousser la section jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position.
- Répétez cette procédure pour la deuxième rampe.

4. MAINTENANCE & SAFETY

- Inspectez régulièrement les rampes pour repérer les pièces usées, desserrées, ou endommagées. Si vous constatez des détériorations, évitez d'utiliser la rampe, et contactez votre revendeur immédiatement.
- Utilisez toujours les deux rampes ensemble, et veillez à ce qu'elles soient au même niveau et disposées parallèlement l'une à l'autre.
- Veillez à ce que les rampes soient déployées entièrement et verrouillées en position.
- Ne tentez pas d'utiliser les rampes sur les angles d'inclinaison au-dessous de 1 à 12. Il convient également de tenir en compte

l'angle d'inclinaison de la pente que le fauteuil roulant serait capable de gravir.

- Ne pas dépasser la capacité de chargement des rampes.
- Les rampes doivent être utilisées par une seule personne / véhicule à mobilité à la fois.
- La surface des rampes peut devenir glissante dans les conditions humides ou verglacées. Veuillez être très prudent dans ces conditions.
- Garder les rampes propres et exemptes de tout débris, car cela pourrait gêner son mouvement de glissement.
- Respectez toujours les instructions d'utilisation fournies par le fabricant du fauteuil roulant / scooter. NE JAMAIS tenter de l'utiliser sur les angles d'inclinaison supérieure à ceux qui sont recommandés.
- Ne pas apporter des modifications ou des ajouts à votre rampe, car cela pourrait invalider toute réclamation effectuée en vertu de la garantie.
- N'utilisez pas votre rampe à d'autres fins que celles prévues.
- Pour nettoyer votre rampe, utilisez un détergent doux
- Faites preuve de prudence lors du réglage de la longueur de vos rampes et évitez les points de pincement.

5. NETTOYAGE

Nettoyez votre canne de marche avec un détergent doux non-abrasif et un chiffon doux. Les produits de nettoyage type AJAX et/ou les éponges abrasives pourraient sérieusement endommager votre produit. Vous ne devez pas les utiliser pour nettoyer votre produit. Veuillez toujours bien sécher votre appareil après le nettoyage.

6. INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations continues dans cette notice ne constituent pas un engagement contractuel par la société Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd ni par ses filiales ou agents et aucune garantie ni représentation n'est fournie concernant ces informations.

Veuillez faire preuve de bon sens et ne pas prendre de risques inutiles lors de l'utilisation du produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter votre part de responsabilité lors de l'utilisation du produit. N'hésitez pas à demander des conseils à votre revendeur ou au fabricant concernant l'assemblage et l'utilisation du produit.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX
Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web:
www.aidapt.co.uk Email: accounts@aidapt.co.uk •
adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk

Usage and Maintenance

Ver. 1 01/2013