



Instructions de montage et d'entretien Kit de fixation pour cadres de Toilette

N.B. Cet équipement doit être installé par un installateur / technicien compétent.

Instructions pour :

VR159 Kit de fixation au sol pieds inclinés

VR204 Kit de fixation au sol pieds droits



1. Installation des kits de fixation au sol (cadre de toilette fourni séparément)

Dans certaines configurations, il sera nécessaire d'ajouter des rallonges de pieds pour votre cadre de toilette, qui peut également être fixé de façon permanente au sol.

Pour procéder, suivez bien les instructions suivantes :

- Enlevez d'abord les rallonges des pieds standard, le cas échéant, en retirant les clips 'E' (voir Fig. 1).
- Fixez les pattes de fixation sur le sol à la hauteur voulue et réinsérez les clips 'E' en assurant que ce clip 'E' a bien traversé le cadre et qu'il s'ajuste étroitement autour du tube (voir Fig. 2)
- Veillez toutefois à ne pas dépasser le point de réglage de la hauteur maximale de 150 mm, mesurée à partir de la position la plus basse de la rallonge du pied lorsque la clip-goupille est enfichée dans la partie supérieure du cadre.
- L'embase du kit de fixation est généralement dans la forme d'un 'T' et contrepercée. Tous les kits de fixation sont conçus pour les vis de taille 10. Toutefois, il convient d'utiliser une fixation adaptée à la surface du sol.
- Le montage doit être effectué par un installateur /

technicien compétent ; le non-respect de ces indications peut compromettre la sécurité de l'utilisateur.



2. NETTOYAGE

Nettoyez Kit de fixation avec un détergent doux non-abrasif et un chiffon doux. Les produits de nettoyage type AJAX et/ou les éponges abrasives pourraient sérieusement endommager votre produit. Vous ne devez pas les utiliser pour nettoyer votre produit. Veuillez toujours bien sécher votre appareil après le nettoyage.

3. Vérification du kit de fixation pour cadre de toilette

Vérifiez toujours la stabilité/montage du cadre de toilette. Revérifiez que la longueur des pieds a été bien réglée avant utilisation.

Please make a safety check of the product at regular intervals or if you have any concerns.

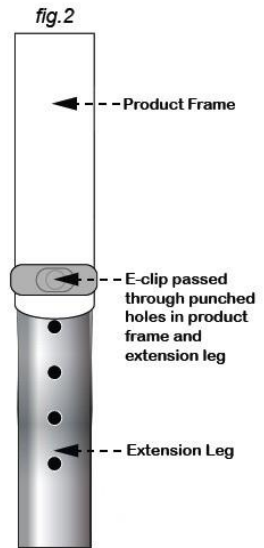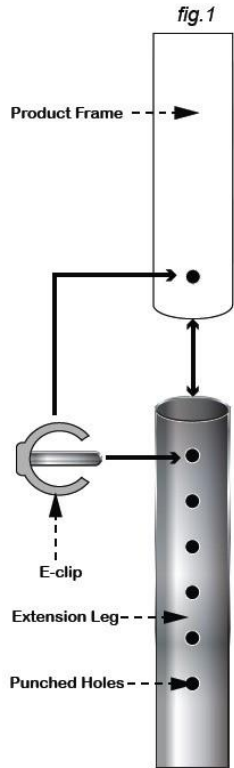

6. Maintenance

Aidapt Bathrooms Ltd., Lancots Lane, Sutton, St. Helens, Merseyside, WA9 3EX
Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.co.uk
E-mail: accounts@aidapt.co.uk • adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk