



Teleskpe-Kanal-Rampe



Gebrauchs- und Wartungsanleitung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme

VORSICHT!

Beurteilen Sie immer die Lage nach möglichen Gefahren. Verwenden Sie diese Rampen nur mit einem qualifizierten Helfer, nie die empfohlene Gewichtsgrenze während des Gebrauchs überschreiten. Sichern Sie immer den Rollstuhl/Scooter der Rampe entlang ab und benutzen Sie einen Beckengurt für Sicherheit. Prüfen Sie stets Bedienungsanleitung für Rollstühle / Scooter auf sichere Neigung für einen bestimmten Stuhl. Dieses Gerät muss von sachkundigem Fachpersonal installiert werden.

VA147F 4ft Kanal-Rampe

VA147M 6ft Kanal-Rampe

Belastbarkeit 180 kg (28 Stone) der beiden Rampen (90 kg/14 Stone pro Rampe)

Überschreiten Sie nicht das angegebene Gewichtslimit - so könnte der Benutzer gefährdet werden.

VERWENDUNG DER RAMPE

- Rampen müssen vor dem Gebrauch immer vollständig geöffnet/ausgestreckt werden, um die Verletzungsgefahr zu minimieren, und auch jeder Auf- oder Abstieg mithilfe der Rampen sollte leichter gemacht werden.
- Wählen Sie einen Ort, wo die Rampen die Mindestneigung haben. Sicherstellen, dass die Neigung der Rampen nicht die Fähigkeit des Rollstuhls oder Insassen übersteigt.
- Legen Sie das schmale Ende der Rampe auf dem Boden oder Tiefpunkt und legen Sie das breite Ende der Rampe am Fahrzeug oder hohem Boden.
- Sicherstellen, dass die Rampen vor dem Gebrauch sicher sind.

AUSKLAPPEN

- Ziehen Sie langsam den engsten Abschnitt der Rampe, während Sie den breitesten Abschnitt halten, bis er in seiner Position verriegelt ist.

WARNUNG! Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, achten Sie bitte beim Ein- oder Ausfahren der Rampe, dass beide Abschnitte fest gehalten werden oder dass der untere Rand der Rampe auf dem Boden aufliegt. NICHT die Rampe in einer erhöhten Position über Füße oder Zehen halten. Der schmale Abschnitt der Rampe gleitet schnell nach unten, wenn der Verriegelungsknopf gedrückt wird.

- Um die Rampe auf volle Länge zu erstrecken, die engste Stelle der Rampe weiterhin ziehen, während die Taste auf der Außenseite der Rampe gedrückt wird. Tun Sie dies, bis der Abschnitt in Position verriegelt ist.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für die andere Rampe.

EINKLAPPEN

- Stellen Sie den schmalsten Abschnitt in den Hauptkörper der Rampe. Tun Sie dies, indem Sie die Taste drücken, während Sie die engste Stelle in den Körper der Rampe schieben.
- Um den Vorgang abzuschließen, auch weiterhin die engste Stelle in den Körper der Rampe drücken, während Sie die Taste drücken. Tun Sie dies, bis die Rampe in Position verriegelt ist.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für die andere Rampe.

WARTUNG

- Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Rampen nach Verschleiß-, losen oder beschädigten Teilen - Wenn Sie einen beschädigten finden, benutzen Sie nicht Ihre Rampen und Sie müssen sich mit Ihrem Händler in Verbindung setzen.
- Verwenden Sie stets beide Rampen, und stellen Sie sicher, dass sie waagrecht und parallel zueinander stehen.
- Stellen Sie sicher, dass Rampen vollständig ausgestreckt und in Position verriegelt sind.
- Benutzen Sie nicht die Rampen bei Steigungen über 1 in 12. Überprüfen Sie die Steigung Ihres Rollstuhls oder Scooter.
- Überschreiten Sie nicht die Belastbarkeit der Rampen.
- Lassen Sie nur eine Person/ Mobilitätswagen die Rampen auf einmal benutzen.
- Die Oberfläche der Rampen kann in vereisten oder nassen Bedingungen rutschig werden. Bitte Vorsicht bei diesen Bedingungen walten lassen.
- Halten Sie Ihre Rampen sauber von Schmutz und Ablagerungen, da dies ihre Schiebebewegung stören könnte.
- Verwenden Sie immer die Rampen im Einklang mit den Herstellerrichtlinien der Rollstühle /Scooter; NIEMALS bei einer steileren Neigung als empfohlen benutzen.
- Verändern oder ergänzen Sie nicht Ihre Rampe, da es keine Garantieansprüche erlöschen kann.
- Verwenden Sie die Rampe nicht für etwas anderes als für den ursprünglich beabsichtigten Zweck.
- Reinigen Sie Rampen mit einem milden Reinigungsmittel.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Länge Ihrer Rampen einstellen und vermeiden Sie jegliche Klemmstellen.

REINIGUNG

Reinigen Sie das Produkt mit einem nicht-scheuernden Reiniger oder einem milden Waschmittel und mit einem weichen Tuch. Scheuermittel oder scheuernde Schwämme können Ihr Produkt ernsthaft und irreparabel beschädigen. Wischen Sie Ihr Produkt nach der Reinigung stets trocken.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Informationen, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, sind nicht Grundlage oder Teil einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited,

Aidapt (Wales) Ltd. oder einer ihrer Vertreter oder ihrer Tochtergesellschaften und es wird keine Garantie oder verbindliche Vertretung bezüglich der betreffenden Informationen gegeben. Bitte handeln Sie nach gesundem Menschenverstand und nehmen Sie keine unnötigen Risiken bei der Verwendung dieses Produkts in Kauf; als Nutzer haften Sie für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts.

Bitte zögern Sie nicht, die Person, die dieses Produkt an Sie vergeben hat, oder den Hersteller (unten beschrieben) zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX
Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web:
www.aidapt.co.uk Email: accounts@aidapt.co.uk •
adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk

