



Vierrädiger Rollator aus Aluminium



VP183WHITE/PURPLE

EINFÜHRUNG

N.B. Dieses Gerät muss von einer sachkundigen Person installiert werden.

VP183WHITE	Weißer Rollator aus Aluminium	120 kg Gewichtslimit
VP183PURPLE	Lila Rollator aus Aluminium	120 kg Gewichtslimit

Überschreiten Sie nicht das angegebene Gewichtslimit- so könnte der Benutzer gefährdet werden.

VOR GEBRAUCH

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung. Verwenden Sie keine Messer oder andere scharfe Instrumente, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können. Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Falls Sie einen Schaden erkennen oder einen Fehler vermuten, bitte verwenden Sie das Produkt nicht, sondern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

VERWENDUNGSZWECK

Ihr Aidapt Rollator wurde entwickelt, um Ihnen beim Gehen und Tragen kleiner Gegenstände in der verfügbaren Tasche zu helfen. Die Tasche wurde entwickelt, um speziell Ihrem Rollator zu passen, verwenden Sie bitte nur die Tasche, die für Ihren Aidapt Rollator geliefert wurde. Verwenden oder kombinieren Sie keine


Tasche und/oder Körbe von anderen Herstellern.

Wenn nicht in Gebrauch, Sie können Sie einfach den Aidapt Rollator zusammenklappen und verstauen, bis Sie es nächstes Mal benötigen. Die Aidapt Serie der dreirädigen Gehhilfen und Rollatoren sind so konzipiert, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Hauses verwendet zu werden.

AUSSTATTUNG

- **Benutzerfreundliche Schlaufenbremsen mit Verriegelung**
- **Einfache Bremskabeleinstellung**
- **Vollräder aus weichem Kunststoff**
- **Schwenkbare Vorderräder**
- **Klappbarer Verriegelungsmechanismus**
- **Höhenverstellbar**
- **Ergonomische Handgriffe, um Druck zu reduzieren**
- **Gehstockhalter**

MONTAGEANLEITUNG

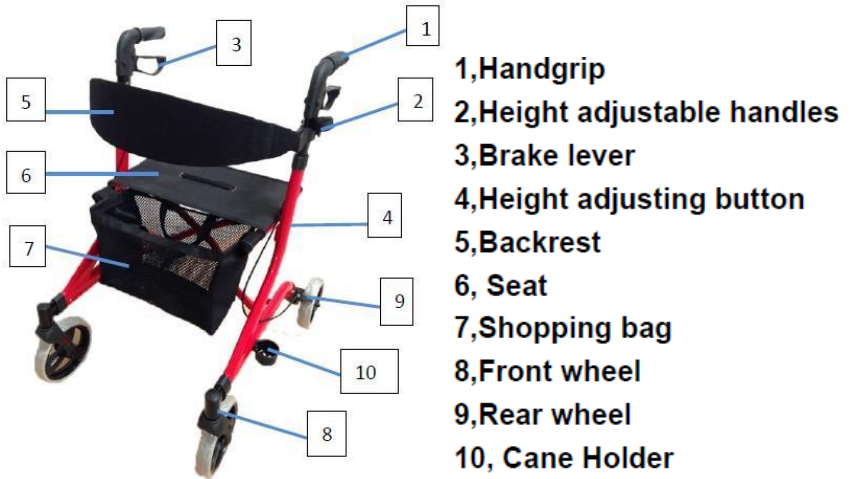



Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsteile, einschließlich der Pappröhren am gerändelten Rohrteil der Bremsen. Überprüfen Sie das Produkt gründlich auf Beschädigungen oder offensichtliche Mängel.



Wenn Sie vermuten, dass das Gerät fehlerhaft sei, benutzen Sie es bitte nicht, sondern kontaktieren Sie sofort Ihren Lieferanten.



(Figure 1)

Schritt 1: Installieren Sie Vorderrad in die Steckhülle an der Vorderseite des Rahmens, während Sie die Tasten für das Vorderrad drücken. Die Tasten knacken, wenn das Rad sicher an seinem Platz ist. Wiederholen Sie für das zweite Vorderrad. (Abbildung 1).



(Figure 2)

Schritt 2: Installieren Sie Hinterrad in die Steckhülle an der Vorderseite des Rahmens, während Sie die Tasten für das Vorderrad drücken. Die Tasten knacken, wenn das Rad sicher an seinem Platz ist. Wiederholen Sie für das zweite Hinterrad. (Abbildung 2).



(Figure 3)

Schritt 3: Stellen Sie die Höheniveau der Griffe, um sich für verschiedene Benutzer zu eignen. Drücken Sie die Tasten für die Handgriffe und ziehen Sie den Handgriff nach oben oder unten. Wie sich der Griff bewegt, lassen Sie die Tasten los. Dies verriegelt es automatisch in die nächste mögliche Höhe

Schritt 4: Die Rückenlehne anbringen, indem die Rückenlehnehaken nach unten in die Hülsen an der Vorderseite des Rahmens geschoben werden.



(Figure 5)

Schritt 5: Die Tasche an den Haken des Sitzrahmens anbringen. Die Einkaufstasche kann einfach bei der Verwendung entnommen werden. (Abbildung 5)



(Figure 6)

Schritt 6: Klappen Sie den Rollator zusammen, indem Sie auf beiden Seiten des Sitzrahmens nach unten drücken. (Abbildung 6).



(Figure 7)

Schritt 7: Um es zusammenzuklappen, ziehen Sie den Sitz nach oben über den schwarzen Griff auf der Sitzplatte, wie in Abbildung 7. Der Rollator kann nun zusammengeklappt werden.

Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungsbolzen wie in Abbildung 10 eingerastet sind.



Abbildung 10

BETÄTIGUNG DER BREMSEN

1. Um zu stoppen, üben Sie vorsichtig mit einem Greifdruck auf beide Bremsen gleichzeitig aus (Abb. 8), dies wird Ihren Rollator verlangsamen und stoppen.
2. Die Bremsen auf Ihrem Aidapt Rollator haben eine Einstell-Option (Abb. 9). Um die Abstell-Option zu betätigen, drücken Sie nach unten auf beiden Bremsen gleichzeitig. Die Bremse wird einen sehr leichten Klick machen. Ihre Bremsen sind jetzt in der "Sperr"-Position.
3. Zum Entsperrern ziehen Sie einfach die Bremse wieder hoch, Sie werden ein leichtes Klicken hören, wenn "Einstellen" gelöst wird.



Abb. 8
9



Abb.

BREMSEINSTELLUNG

Das Bremssystem Ihres Aidapt Rollators muss periodisch eingestellt werden.



Abbildung 11

Zum Einstellen der Bremsen Mutter B lösen und dann Mutter A auf-/abschrauben. Nach der Einstellung Mutter B wieder fest anziehen. Wenn eine weitere Einstellung erforderlich ist, dann lösen Sie die Verschlusschraube und dann ziehen Sie das Kabel nach unten mit einer Zange um etwa einen Millimeter. Verriegelungsschraube nachziehen. Die Bremsen können dann weiter eingestellt werden, indem Mutter B gelöst und Mutter A wie zuvor auf-/abgeschraubt wird.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG & IHRE VERPFLICHTUNG

1. Verwenden Sie Ihren Aidapt Rollator nur für den Zweck, für den er bestimmt ist, also als eine Gehhilfe. Es ist beabsichtigt, dass der Rollator nur auf Standardpflaster oder zu Hause verwendet wird. Es sollte nicht auf unebenem Gelände oder Oberflächen mit Schlaglöchern verwendet werden. Die Nutzung Ihres Rollators auf diesen Oberflächen kann Ihre Sicherheit akut gefährden und Ihren Rollator total beschädigen.
2. Halten Sie Ihren Aidapt Rollator sauber, indem sie ihn mit einem feuchten Tuch mit einem milden Reinigungsmittel abwischen. Verwenden Sie unter keinen Umständen abrasive oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, da diese den Rollator beschädigen und die Garantie erlischt.
3. Alle Oberflächen mit einem trockenen Tuch abwischen und ein Wasserdispersionsmittel wie WD40 auf allen Metallverbindungen verwenden.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Räder und der Klappmechanismus richtig funktionieren und dass sich alle Räder frei bewegen. Achten Sie besonders auf die Vorderräder, stellen Sie sicher, dass sie sich frei und ohne Behinderung drehen und dass sie fest mit dem Rahmen verbunden sind.



Entnehmen Sie sofort Ihren Aidapt Rollator, wenn die Räder schwierig zu drehen werden oder Sie fühlen, dass sie nicht sicher an dem Rahmen sitzen oder wenn Sie Schäden oder andere Fehler vermuten.

5. Monatliche Kontrolle - Überprüfen Sie, dass die seitlichen

Verriegelungshebel entsprechend gesichert sind (Abb 10).

Überprüfen Sie, dass keine Komponenten lose sind.

Überprüfen Sie die Bremseinstellung (Abb 11). Überprüfen Sie Rollen.

6. Montieren Sie keine Teile oder Zubehör an den Aidapt Rollator, die von einer anderen Firma hergestellt sind. Die Garantie wird für nichtig erklärt und Ihre Sicherheit kann gefährdet werden.

7. Wir schlagen vor, dass Sie Ihren Aidapt Rollator jeden Tag visuell überprüfen. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Rollator alle drei Monate oder weniger warten lassen, wenn er von verschiedenen Benutzern verwendet wird.

REINIGUNG

Reinigen Sie das Produkt mit einem nicht-scheuernden Reiniger oder einem milden Waschmittel und mit einem weichen Tuch.

Scheuermittel oder scheuernde Schwämme können Ihr Produkt ernsthaft und irreparabel beschädigen. Wischen Sie Ihr Produkt nach der Reinigung stets trocken.

WARTUNG

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben eine Sicherheitsprüfung des Produkts durch.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Informationen, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, sind nicht Grundlage oder Teil einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited,

Aidapt (Wales) Ltd. oder einer ihrer Vertreter oder ihrer Tochtergesellschaften und es wird keine Garantie oder verbindliche Vertretung bezüglich der betreffenden Informationen gegeben. Bitte handeln Sie nach gesundem Menschenverstand und nehmen Sie keine unnötigen Risiken bei der Verwendung dieses Produkts in Kauf; als Nutzer haften Sie für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts.

Bitte zögern Sie nicht, die Person, die dieses Produkt an Sie vergeben hat, oder den Hersteller (unten beschrieben) zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben

SPEZIFIKATION

Gesamttiefe (mm)	840
Breite Aufgeklappt (mm)	660
Breite Zusammengeklappt (mm)	290
Griffhöhe (mm)	870-960
Sitz BxT (mm)	460x250
Vorderrad (mm)	203
Hinterrad (mm)	178
Nettogewicht (kg)	6.9
Bruttogewicht (kg)	7.6

**Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens,
WA9 3EX**

Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745

001 • Web: www.aidapt.com

Email: sales@aidapt.co.uk